





Plaats een nieuwe **FreeStyle Libre 3 Plus**-sensor en koppel de Tandem t:slim mobile app met de t:slim X2-insulinepomp voordat u deze stappen uitvoert.

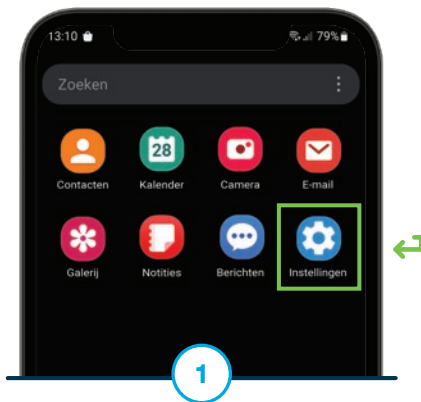


iOS-gebruikers: ga naar stap 4. Android-gebruikers: tik op **Instellingen** op het startscherm van de smartphone.



Tik op **Verbindingen** om door te gaan.

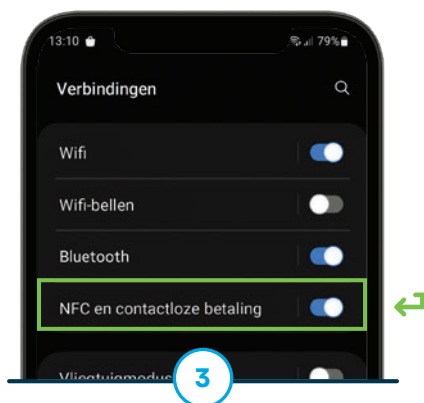

Zorg ervoor dat de optie voor NFC en contactloze betalingen is ingeschakeld.

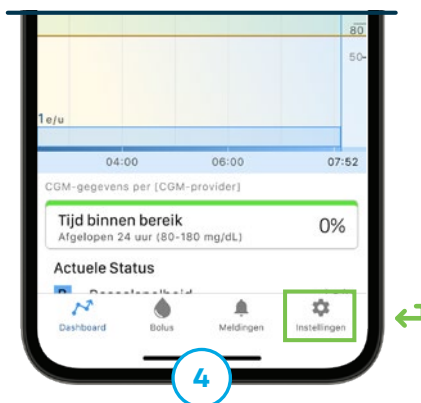


Tik op **Instellingen** op de navigatiebalk van de Tandem t:slim mobile app.




Tik op **CGM** en vervolgens op **FreeStyle Libre 3 Plus** om door te gaan.



Android-gebruikers: ga naar de volgende stap.
iOS-gebruikers: tik op **Beginnen met scannen** om door te gaan.

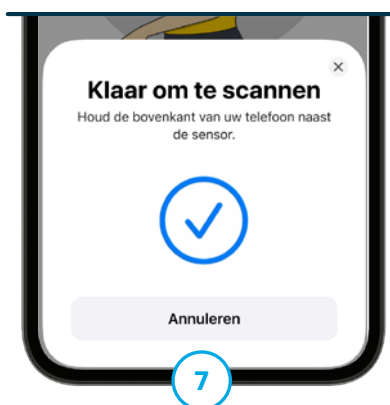

Houd de bovenkant (iOS) of achterkant (Android) van de smartphone in de buurt van de sensor tot deze trilt en er een waarschuwing klinkt.

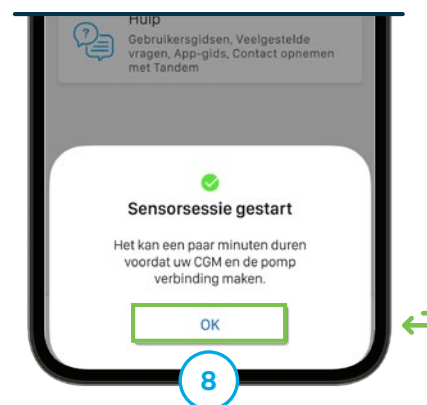

Het scherm Sensorsessie gestart wordt weergegeven.
Tik op **OK**.

Sensorsessie starten (vervolg)



Er wordt een CGM-trendgrafiek en een aftelsymbool van 1 uur weergegeven voor het opstarten van de sensor.



Het symbool wordt gevuld na verloop van tijd om weer te geven hoeveel tijd er nog overblijft.



Zodra het opstarten is voltooid, begint de nieuwe sessie.

Bezoek tandemdiabetes.com/support voor bijkomende hulpbronnen.

Deze instructies dienen als referentie voor personen die al vertrouwd zijn met gebruik van een insulinepomp van Tandem Diabetes Care. Niet alle schermen worden weergegeven. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde informatie over de werking van de t:slim X2-pomp.

Belangrijke veiligheidsinformatie: Tandem-insulinepompen zijn bedoeld voor de subcutane toediening van insuline met ingestelde en variabele snelheden, voor het beheer van diabetes mellitus bij personen die insuline nodig hebben. Bezoek tandemdiabetes.com/safetyinfo voor aanvullende belangrijke veiligheidsinformatie.

WAARSCHUWING: De Control-IQ+-technologie mag niet worden gebruikt door personen die jonger zijn dan 2 jaar en diabetes type 1 hebben. Het mag ook niet worden gebruikt bij patiënten die minder dan een totale dagelijkse insulinedosis van 5 eenheden per dag nodig hebben of die minder dan 9 kilogram wegen, aangezien dit de vereiste minimumwaarden zijn die nodig zijn om Control-IQ+ veilig te laten functioneren.

© 2026 Tandem Diabetes Care, Inc. Alle rechten voorbehouden. Tandem Diabetes Care, Tandem-logo's, t:slim, t:slim X2 en Control-IQ+ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Tandem Diabetes Care, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. De sensorbehuizing, FreeStyle, Libre en gerelateerde merken zijn merken van Abbott en worden met toestemming gebruikt. iOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt onder licentie gebruikt. Android is een handelsmerk van Google LLC. MAT-0911_1



TANDEM
Diabetes Care

t:slim X2
Insulinepomp