



Aplicação móvel Tandem t:slim Dicas de configuração



A aplicação móvel requer um *smartphone* compatível. Consulte tandemdiabetes.com/compatibility para garantir que o seu dispositivo é compatível.




📌 **Nota:** Estas instruções são facultadas como um guia de referência para pessoas que já estão familiarizadas com a utilização da bomba de insulina da Tandem Diabetes Care. Nem todos os ecrãs se encontram apresentados. Para informação mais detalhada sobre o funcionamento da bomba de insulina t:slim X2, consulte o Manual do Utilizador.



O tempo do primeiro *upload* sem fios dos dados da bomba da aplicação móvel para a plataforma Tandem Source pode variar entre alguns minutos e várias horas.

Recomendamos a utilização do cabo USB da Tandem Diabetes Care para fazer o *download* dos dados da bomba para um computador primeiro. Desta forma, os futuros *uploads* de dados serão mais fáceis.

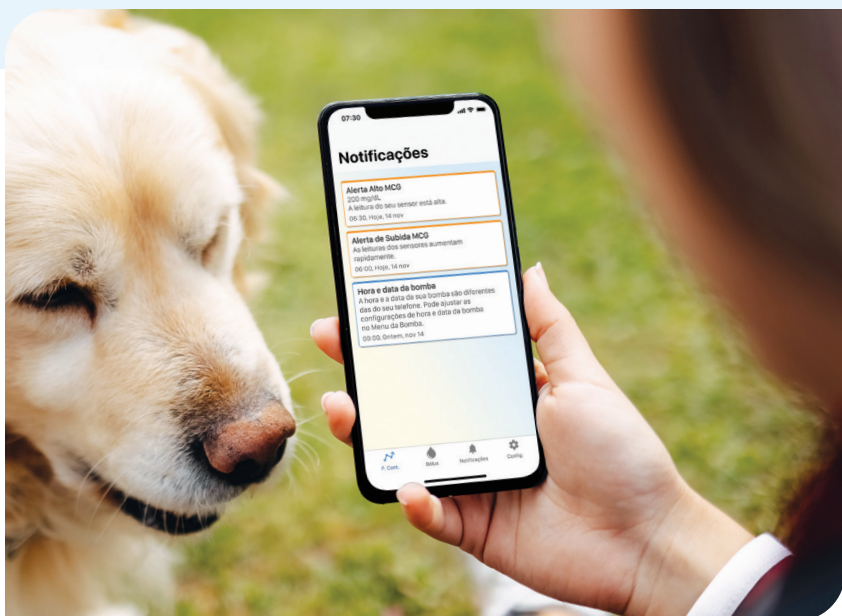

Configurações do smartphone



Desative o modo de zoom

ao utilizar a aplicação móvel Tandem t:slim. Pode encontrar esta funcionalidade nas definições de acessibilidade do seu *smartphone*.



Desative as atualizações automáticas

para que o utilizador possa confirmar se a aplicação é compatível com a nova versão de *software* do sistema operativo antes de fazer a atualização manualmente.



Ative a segurança do smartphone

(por exemplo: bloqueio de ecrã, senha, reconhecimento facial) antes de ajustar a administração de insulina e programar a bomba.



Ative as notificações, desative o Modo de Baixo Consumo de Energia

e autorize todas as solicitações de permissão para receber alertas e alarmes da bomba.



Se o utilizador já tiver uma conta Tandem Source, inicie sessão com o e-mail e *password* existentes. Utilizadores novos podem criar uma conta pessoal ou de Pai/Mãe/Responsável legal.



Descodifique facilmente o ecrã do Painel de controlo com o Glossário de ícones e gráficos integrado. Este glossário encontra-se localizado no menu Ajuda em Configurações e fornece descrições para cada elemento no ecrã.



Pronto para começar? Utilize o Guia rápido "Emparelhar a aplicação móvel" para conectar a aplicação móvel à bomba de insulina t:slim X2.

Para informação adicional sobre configurações do *smartphone*, consulte o Guia da aplicação móvel, localizado no menu Ajuda nas Definições.



Dicas e Troubleshooting



1,5 metros de distância

A distância entre o *smartphone* e a bomba de insulina t:slim X2 não deve ultrapassar os 1,5 metros, para permanecerem conectados e ser possível fazer o *upload* de dados da bomba.



Não fechar

A aplicação móvel deve correr em segundo plano para receber e transmitir dados de e para a bomba de insulina e para garantir que o utilizador continua a receber notificações.



Password

Nunca partilhe a *password* nem autorize outras pessoas a aceder ao seu *smartphone* para evitar alterações não intencionais na administração de insulina.



Telemóvel danificado

Interrompa a utilização da aplicação móvel se o *smartphone* estiver significativamente danificado. Utilize um método alternativo de administração de insulina até que o *smartphone* possa ser substituído.

Carlos
diagnosticado em 2013



Conexão perdida
Verifique o menu *Bluetooth*® no seu *smartphone* para confirmar se a bomba está conectada. Caso contrário, toque no nome da bomba na lista para reconectar.



Problemas de conexão

Se o utilizador tiver problemas ou dificuldades para conectar a bomba à aplicação móvel, force a interrupção ou termine a sessão atual. De seguida, toque no ícone da aplicação móvel para a reiniciar.

As informações exibidas na aplicação móvel Tandem t:slim X2 podem não ser idênticas ao estado atual da sua bomba. Os uploads sem fios da aplicação móvel Tandem t:slim para a plataforma Tandem Source requerem um *smartphone* compatível e uma ligação à internet ou de dados sem fios.

Informação de segurança importante: A [bomba de insulina t:slim X2](#) destina-se à administração subcutânea de insulina, em débitos fixos e variáveis, para o tratamento da diabetes mellitus em pessoas que necessitam de insulina. A bomba é capaz de comunicar de forma fiável e segura com dispositivos compatíveis e conectados digitalmente.

A [tecnologia Control-IQ](#) destina-se a ser utilizada com um sistema de monitorização contínua da glicose (MCG) e a bomba de insulina t:slim X2 para aumentar, diminuir e suspender automaticamente a administração de insulina basal com base nas leituras do sistema MCG e nos valores previstos de glicose. Pode ainda administrar bólus de correção quando se prevê que o valor de glicose ultrapasse o limite predefinido. A bomba é indicada para utilização em pessoas com idade igual ou superior a seis anos que necessitem de uma dose de insulina diária total de, pelo menos, 10 unidades e que pesem, pelo menos, 25 quilogramas. A bomba destina-se a ser utilizada por um único paciente. Para uma lista de insulinas compatíveis, consultar o Manual do Utilizador.

AVISO: A tecnologia Control-IQ não deve ser utilizada por crianças com menos de 6 anos de idade. Também não deve ser utilizada por utilizadores que necessitem de menos de 10 unidades de insulina por dia ou que pesem menos de 25 kg.

O Sistema não é indicado para ser utilizado em grávidas, pessoas em diálise, ou utilizadores gravemente doentes. Não utilize o Sistema se tomar hidroxiureia. Os utilizadores da bomba e do sistema devem: estar dispostos e ser capazes de utilizar a bomba de insulina, o MCG e todos os outros componentes do sistema de acordo com as respetivas instruções de utilização; efetuar os testes de glicemia como recomendado pelo seu profissional de saúde; demonstrar capacidades adequadas de contagem de hidratos de carbono; demonstrar capacidades suficientes de autogestão da diabetes; consultar o profissional de saúde regularmente; e ter visão e/ou audição adequadas para reconhecer todas as funções da bomba, incluindo os alertas, alarmes e lembretes. A bomba t:slim X2 tem de ser retirada antes da realização de quaisquer exames de RM, TAC ou diatermia. Para informações adicionais importantes de segurança, acesse a tandemdiabetes.com/safetyinfo.

Aplicação móvel Tandem t:slim: A aplicação móvel Tandem t:slim destina-se a disponibilizar um ecrã secundário para bombas de insulina Tandem Diabetes Care compatíveis e tem a capacidade de carregar dados da bomba para a plataforma Tandem Source. A aplicação móvel Tandem t:slim não se destina a controlar a bomba de insulina e não pretende substituir as informações apresentadas na sua bomba de insulina. As decisões de dosagem não devem ser tomadas com base neste dispositivo de visualização secundário. O utilizador deve seguir as instruções do sistema de monitorização contínua da glicose e da bomba de insulina. Este dispositivo de visualização secundário não se destina a substituir as práticas de automonitorização, conforme aconselhado por um médico.

A [plataforma Tandem Source](#) destina-se a ser utilizada por pessoas com diabetes mellitus que utilizam bombas de insulina Tandem Diabetes Care, pelos seus cuidadores e pelos seus profissionais de saúde em casa e em ambientes clínicos. A plataforma Tandem Source apoia a gestão da diabetes através da visualização e análise de informações carregadas a partir das bombas de insulina Tandem.

© 2024 Tandem Diabetes Care, Inc. Todos os direitos reservados. Tandem Diabetes Care, os logótipos Tandem, Control-IQ, Tandem Source, t:slim e t:slim X2 são marcas registadas ou marcas comerciais da Tandem Diabetes Care, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países. A palavra e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc., e qualquer utilização dessas marcas por parte da Tandem Diabetes Care, Inc. é feita sob licença. Todas as marcas de terceiros são propriedade dos respetivos titulares. ML-1014690_A

CMR-D-DB460/1